



# DENTIRO® Zero

**Alkoholfreies, gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel zur Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten.**



## Zweckbestimmung



DENTIRO® Zero ist eine alkoholfreie, gebrauchsfertige Lösung zur Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten mit empfindlichen Oberflächen wie z.B. zahnärztliche Behandlungseinheiten. DENTIRO® Zero ist besonders geeignet zur Desinfektion von alkoholempfindlichen Materialien wie Kunstleder, Plexiglas® und PVC.

## Vorgesehene Anwender



Das Produkt ist für die Verwendung durch professionelle Fachkräfte im zahnmedizinischen oder gesundheitlichen Bereich mit spezifischen Kompetenzen für den Desinfektionsprozess von Medizinprodukten bestimmt. Das Produkt ist nicht für die direkte Verwendung am Patienten bestimmt.

## Gebrauchsanweisung



Zum Selbstschutz Einweghandschuhe und Schutzbrille tragen. Die Fläche des zu desinfizierenden Medizinproduktes vollständig benetzen und abwischen. Desinfektionsmittel einwirken lassen und Einwirkzeit einhalten. Bei Erstanwendung die Materialverträglichkeit des Desinfektionsmittels an unauffälliger Stelle überprüfen. Eine Liste kompatibler und inkompatibler Materialien ist auf unserer Webseite verfügbar. Wenn Sie hinsichtlich der Materialzusammensetzung des Medizinproduktes Fragen haben, wenden Sie sich vor der Verwendung an den Hersteller des Medizinproduktes. Medizinprodukte, die mit Haut in Kontakt kommen, einmal täglich mit einem mit Wasser getränkten Einwegtuch abwischen, um der Ansammlung von Bioziden vorzubeugen. Jeder schwere Unfall, der sich bezüglich des Medizinproduktes ereignet, ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

## Einschränkungen



**NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ.** Nicht für invasive Medizinprodukte geeignet. Nicht mit anderen Produkten mischen. Stellen Sie sicher, dass alle sichtbaren Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernt wurden.

## Handhabung



Kein Signalwort gemäss Verordnung (EG) 1272/2008. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Inhalt/Behälter gemäss lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website.



## Lagerung



An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und offener Flamme schützen. Lagertemperatur: < 30°C

## Physikalische Eigenschaften



Physikalischer Zustand: Klare, nicht viskose Flüssigkeit	pH-Wert: 8.2 - 8.8
Farbe: Farblos	Haltbarkeit: 48 Monate (ungeöffneter originalbehälter)
Duft: Apfel	

## Zusammensetzung in 100 g



100 g enthalten 0,4 g Benzalkoniumchlorid, 0,4 g N-Alkylaminopropylglycin, Hilfsstoffe und Wasser.

## Wirkspektrum



Bakterizid	EN 13727:2012+A2:2015*, EN 16615:2015^	60 Sek
Tuberkulozid	EN 14348:2005^	60 Min
Mykobakterizid	EN 14348:2005^	60 Min
Levurozid	EN 13624:2013*, EN 16615:2015^	60 Sek
Behüllte viren	EN 14476:2013+A1:2015*	15 Sek
Viruzid	EN 14476:2013+A1:2015^	60 Min

^ Getestet unter geringer organischer Belastung / \* Getestet unter hoher organischer Belastung

## Verträglichkeit



Acetal-Polymer	Kompatibel.
Acrylglas	Kompatibel.
Acrylnitril-Butadien-Styrol	Kompatibel.
Kunstleder	Kompatibel.
Keramik	Kompatibel.
Chloriertes Polyvinylchlorid	Kompatibel.
Polyamid	Kompatibel.
Polybutylenterephthalat	Kompatibel.
Polycarbonat	Kompatibel.
Polyetherimid	Kompatibel.
Polyethylen	Kompatibel.
Polyethylenterephthalat	Kompatibel.
Polyphenylenoxide	Kompatibel.
Polyphenylsulfon	Kompatibel.
Polypropylen	Kompatibel.



Polystyrol	Kompatibel.
Polysulfon	Kompatibel.
Polyvinylchlorid	Kompatibel.
Polyvinylidenfluorid	Kompatibel.
Rhodium	Kompatibel.
Silikon	Kompatibel.
Edelstahl	Kompatibel.
Stahl	Kompatibel.
Thermoplastisches Elastomer	Kompatibel.
Thermoplastisches Polyurethan	Kompatibel.
Ultrahochmolekulares Polyethylen	Kompatibel.

## Lieferformen



CH-011004	200 ml Schaumerflasche
CH-011100	1 Liter Flasche
CH-011104	5 Liter Kanister

## Gesetzlicher Hersteller, EU-Bevollmachtigter, Importeur, Handler



Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Schweiz  
 +41(0)44 226 44 44 • info@oroclean.com • www.oroclean.com



Oro Clean Chemie s.r.o. • Vinohradská 2828/151 • Žižkov • 130 00 Praha 3 • Czech Republic  
 info@oroclean.cz • www.oroclean.cz